

類別:機械器具49 医療用穿孔器、穿孔器及び穿孔器
管理医療機器 一般名称:歯科用根管口拡大ドリル
JMDN:*70686000
販売名:リーマーT


【禁忌・禁止】

〈適用対象〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

**[形状]

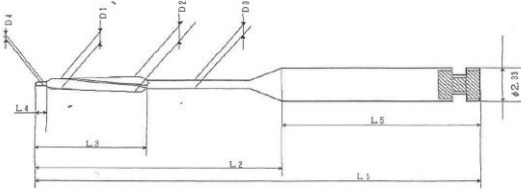

**

種類	D1	D2	D3	D4	(単位 mm)
No.1	0.50	0.70	0.55	0.30	
No.2	0.60	0.80	0.60	0.30	
No.3	0.75	0.95	0.65	0.30	
No.4	0.90	1.10	0.70	0.35	
No.5	1.05	1.25	0.75	0.35	
No.6	1.20	1.40	0.80	0.40	(公差 ±0.02)

**

種類	L1		L2		L3	L4	L5
	15mm	20mm	15mm	20mm			
No.1	27.5	32.5	15.0	20.0	7.0	0.6	12.5
No.2							
No.3							
No.4							
No.5							
No.6							

(公差 ±0.1)

[原材料]

主原料 JIS G 4309 ステンレス鋼線

[原理]

リーマーTは、穿孔を防ぐため先端に刃の無いパイロット(突起)があり、約3度のテーパ角度と三枚の切れ刃からなるコントラングル(CA)タイプの電動用根管器具である。

【使用目的又は効果】

- リーマーTは、低速回転操作で歯冠側2/3から根管中央部のロート状に拡大(根管口拡大)するのに効果的である。

【使用方法等】

- 用途に応じた種類を選びハンドピースに装着し低速で使用すること。

【使用上の注意】

- ステンレス鋼使用:素材のステンレス鋼は炭素鋼に比較して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によって錆びることがある。以下の使用上の注意を守ること。
- 禁忌の薬剤:次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリンフェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。
- 家庭用洗剤の使用禁止:家庭用洗剤は、金属を腐食させる事があるので使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。

- 機能水の使用禁止:超酸化水(強酸性水)等は金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
- 洗浄・消毒・滅菌上の注意:洗浄・消毒・滅菌には、精製水を使用する事が望ましい。
- 薬液消毒を行う時は薬剤の添付文書の使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属を腐食劣化させる場合がある。
- 加熱滅菌器(オートクレーブなど)の消毒温度に注意すること。高温の乾燥は金属を劣化させる場合がある。
- 洗浄、消毒、滅菌後の乾燥は速やかに短時間で確実にすること。水分の付着は、錆、シミの原因になることがある。
- 直火や高熱め滅菌器(ガラスビーズ滅菌器など)の中に入れると金属を劣化させる事がある。
- 保管上の注意:「もらい錆」の原因となるので、錆びている器具や化学薬品と一緒に収納、保管しないこと。高温多湿の場所は避けること。
- 取り扱いについて:器具の矯正(ねじり戻し、曲げ戻し)は、器具の破損の原因となるので、行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管上の注意:「もらい錆」の原因となるので、錆びている器具や化学薬品と一緒に収納、保管しないこと。高温多湿の場所は避けること。

【保守・点検に関わる事項】

- 使用前、使用後の点検:器具の変形・錆・傷・ひび等が無いことを確認すること。
- 器具を補助器具・装置に装着して使用する場合は、その補助器具・装置の添付文書に従い正しく使用すること。
- 使用後の器具は、滅菌後感染性廃棄物として処理すること。

【製造販売業者及製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: ピヤス株式会社
住所: 〒132-0035 東京都江戸川区平井6-73-9
TEL: 03-3619-1441
FAX: 03-3619-1443

製造元: ピヤス株式会社
住所: 〒132-0035 東京都江戸川区平井6-73-9
TEL: 03-3619-1441
FAX: 03-3619-1443