

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント JMDN 31872000
ピヤス・カラーコード・ガッタパーチャ・ポイント

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 天然ゴムに対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
3. 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状】

つまみ部分(下図の斜線部分)がISO規格に基づいて色分けされている。

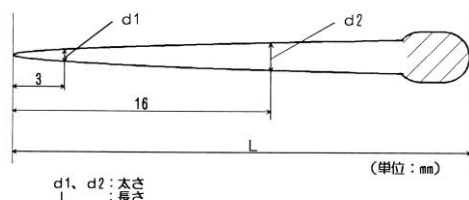

【寸法】

全長: 28.0mm
外径: d1: 先端から3mmの位置
d2: 先端から16mmの位置

製品 No.	色	外径 (mm)	
		d1	d2
15	白	0.21	0.47
20	黄	0.26	0.52
25	赤	0.31	0.57
30	青	0.36	0.62
35	緑	0.41	0.67
40	黒	0.46	0.72
45	白	0.51	0.77
50	黄	0.56	0.82
55	赤	0.61	0.87
60	青	0.66	0.92
70	緑	0.76	1.02
80	黒	0.86	1.12
90	白	0.96	1.22
100	黄	1.06	1.32
110	赤	1.16	1.42
120	青	1.26	1.52
130	緑	1.36	1.62
140	黒	1.46	1.72

【材質】

酸化亜鉛、ガッタパーチャ、硫酸バリウム、酸化チタン、ベンガラ、顔料

【使用目的又は効果】

歯根部の根管充填

【使用方法等】

【使用方法】

1. 通法に従い、根管を拡大形成する。
2. 根管形成の際、最後に使用したファイルと同じサイズの本品を選択し、5%消毒用アルコール又は5%次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒する。
3. 本品を、必要な場合には根管充填用シーラーを塗布してから根管に挿入、充填する。
4. 充填後、空隙がある場合は純正のアクセサリーポイントを差し込み、充填器具を用いて、本品を圧入、充填する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 使用前に5%消毒用アルコール又は5%次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒すること。
2. 本品が根尖近くまで十分に充填されていることを、X線写真等で確認すること。

【使用上の注意】

【使用注意】

再使用しないこと。

【重要な基本的注意】

1. 本品は天然ゴムを含有しているため、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等の症状を起こすことがある。このような症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
2. 本品に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
3. 本品の使用により過敏症が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

直射日光を避けて室温で保管すること。

【使用期限】

製造日より3年(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社
電話番号 03-3831-0176(代)
製造業者 メタ バイオメド社
(META BIOMED Co., LTD.)
国名 韓国