

歯科材料 04 歯科用根管充填材料  
管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント JMDN 31872000

## ピヤス・ガッタパーチャ・ポイント


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 天然ゴムに対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
3. 再使用しないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

[形状]

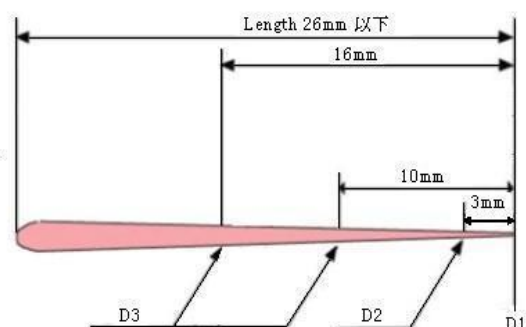

[外径]

D2：先端から3mmの位置

D3：先端から16mmの位置（全長Lが短いものは10mmの位置）

形名	表示番号	D1 (mm)	D2 (mm)	D3	
				先端から10mmの位置 (mm)	先端から16mmの位置 (mm)
FS	2404	0.24	0.30	0.56	
FM	1704	0.17	0.28		0.76
FL	2003	0.20	0.28		0.62
S	2305	0.23	0.30	0.62	
M	1706	0.17	0.35		1.15
L	2403	0.24	0.33		0.73
LM	1107	0.11	0.31		1.17
XL	2706	0.27	0.45		1.25

[材質]

酸化亜鉛、ガッタパーチャ、硫酸バリウム、酸化チタン、ベンガラ

#### 【使用目的又は効果】

歯根部の根管充填

#### 【使用方法等】

[使用方法]

1. 通法に従い、根管を拡大形成する。
2. 根管形成の際、最後に使用したファイルと同じサイズの本品を選択し、5%消毒用アルコール又は5%次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒する。
3. 本品を、必要な場合には根管充填用シーラーを塗布してから根管に挿入、充填する。
4. 充填後、空隙がある場合は純正のアクセサリーポイントを差し込み、充填器具を用いて、本品を圧入、充填する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 使用前に5%消毒用アルコール又は5%次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒すること。
2. 本品が根尖近くまで十分に充填されていることを、X線写真等で確認すること。

#### 【使用上の注意】

[使用注意]

再使用しないこと。

[重要な基本的注意]

1. 本品は天然ゴムを含有しているため、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等の症状を起こすことがある。このような症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
2. 本品に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
3. 本品の使用により過敏症が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光を避けて室温で保管すること。

[使用期限]

製造日より3年（自己認証による）

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社  
電話番号 03-3831-0176(代)  
製造業者 メタ バイオメド社  
(META BIOMED Co., LTD.)  
国名 韓国