

類別:機械器具49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
管理医療機器 一般名称:電動式歯科用ファイル  
JMDN:31878022

## 販売名:Uファイル

### 【禁忌・禁止】

〈適用対象〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

1. Uファイルの作業部(先端から最小16mm)は、螺旋状の切り刃で、1mm当たり1½～2¼個の捻り加工の溝を形成しており、断面形状は四角形である。

針部全長 33mm±0.5mm

シャフト部直径 0.8mm (No.10～No.40)

1.0mm (No.45～No.50)

ラバーストッパー材質 シリコンラバー

種類(サイズ) No.10～No.50

対応規格 JIS T 5211(歯科用根管ファイル)

### 2. 主原料

JIS G4314 バネ用ステンレス鋼線

### 【使用目的又は効果】

1. Uファイルは、超音波振動と薬液や水の併用によって根管拡大形成及び根管内清掃に用いる。

### 【使用方法等】

1. 用途に応じた種類を選び超音波根管洗浄器のハンドピースに装着する。
2. パワー値は、使用する超音波根管洗浄器の取り扱い説明書に従うこと。
3. ファイルの先端まで薬液や水を充分供給されていることを確認し、上下運動のみで回転運動はしないこと。

### 【使用上の注意】

1. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリンフェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。
2. 滅菌・消毒・洗浄には、歯科小器具用防錆洗浄剤を使用し、機能水(強酸性水)は使用しないこと。
3. 薬液消毒を行う時は薬剤の添付文書の使用上の注意を守ること。
4. 加熱滅菌器(オートクレーブなど)の消毒・滅菌・乾燥は、速やかに短時間で確実にすること。
5. 直火や高熱滅菌器(ガラスビーズ滅菌器など)の中に入れると金属を劣化させる事がある。
6. 器具の矯正(ねじり戻し、曲げ戻し)は、器具の寿命を著しく低下させるので避けること。
7. 感染予防の立場から出来るだけ再使用は避けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 化学薬品類と一緒に収納、保管しないこと。
2. 高温多湿の場所は避けること。

### 【保守・点検に関する事項】

1. 器具の変形・錆・傷・ひび等が無いか確認すること。
2. 補助器具・装置の添付文書に従い正しく使用すること。
3. 使用後の器具は、滅菌後感染性廃棄物として処理すること。

### 【製造販売業者及製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: ピヤス株式会社

住所 〒132-0035

東京都江戸川区平井6-73-9

TEL 03-3619-1441

FAX 03-3619-1443

製造元: ピヤス株式会社

住所 〒132-0035

東京都江戸川区平井6-73-9

TEL 03-3619-1441

FAX 03-3619-1443