

等速・減速コントラ専用

チャック内清掃ノズル  
コントラジェット

# Contra Jet

ピヤス株式会社



この度は、コントラジェットをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
当製品は弊社商品”ハンドピース潤滑・洗浄スプレー「Pスプレー」”に装着してご使用頂く等速・減速コントラ専用のチャック内清掃ノズルです。  
バーが外れなくなる原因は「汚れ」と「注油不足」です。  
チャック内部に直接注油して、その汚れを定期的に除去することでバーの噛みつきが改善され、かつチャックの脱着がスムーズになり、修理代も軽減します。ぜひ毎日の注油時にご使用下さい。

## ❗ 当製品をご使用される前に必ずご確認ください

以下のご使用方法において生じた故障や破損に関しまして弊社は責任を負いかねます。あらかじめご了承下さいませ。

### ●ご使用後の返品・交換はお受けいたしかねます

#### ●ノズルが垂直ではない状態で挿入し、曲げてしまった場合

ノズルが垂直に挿入されていないと、チャック内部まで到達しません。垂直ではない状態での挿入を繰り返すと、ノズルが曲がる原因となります。

#### ●チャックが全開ではない状態で挿入し、曲がり・破折した場合

バーが入りづらい(固くなっている)場合は、バックキャップの不具合が考えられます。この状態ではチャックが全開になっていません。事前にハンドピースメーカーにお問い合わせ下さい。

「ご使用方法」 ※滅菌前に行います。コントラに付着した汚れや血液を拭き取ってから行って下さい。

**注油前**

① バックキャップを強く押し、ノズルを垂直にして回しながら差し込む(バーを差す時と同じようにボスまで差し込む)

② カップリングにスプレーの噴射口を挿入する

**注油**

③ 汚れが飛び散らないように紙や布などで覆い、注油する (※1秒～2秒程度、断続的に)

**注油後**

④ スプレーを外し、バックキャップを押しながら垂直にノズルを引き抜く

⑤ オイルをなじませるようにバックキャップを5・6回空押しする

**スムーズに挿入し  
スムーズに噴射**

極限までシャフト内部孔を細く小さく設計。折れや曲がりに対し耐久性を持たせました。

先端部 2孔

オイルの流れ

- ◎ノズルは無理に押し込まないでください。
- ◎スプレーの注油は1秒～2秒程度、「シュッ・シュッ」と断続的に押し噴射して下さい。
- ◎スプレー缶は、斜めや逆さまでのご使用はおやめ下さい。  
(斜めや逆さまでのご使用は液化ガスが漏れるおそれがあります。連続して噴射を行うと缶が冷たくなります。噴射は断続的に行い、注油が複数本になる場合には間隔を開けてご使用になるか、スプレーを取り変えるなどとしてご使用下さい。)
- ◎使用後のノズルは乾いた布などでオイルを拭き取って下さい。 ※ノズル(コントラジェット)は、オートクレーブのご使用はできません。

## 「仕様」

寸法	全長：48 mm
	ノズル：長さ 16 mm / Φ2.2 mm (先端部)
	カップリング：長さ 32 mm
重量	約 5 g
材質	ノズル：ステンレス
	カップリング：アルミ

## 「よくある質問」

- ・ストレートコントラに使えますか？ ————— 使えます。(バーの抜け防止につながります)
- ・5倍速コントラに使えますか？ ————— 使えません。(弊社姉妹品「タービンジェット」をご使用下さい)
- ・メーカー問わずに使えますか？ ————— 使えます。(古い型や海外メーカー等、一部ご使用頂けないものもございます)
- ・レバー式コントラ(旧タイプ)に使えますか？ — 使えます。



お問い合わせは [www.pys-dental.com](http://www.pys-dental.com)  
ピヤス株式会社

〒132-0035 東京都江戸川区平井 6-73-9  
TEL 03-3619-1441 FAX 03-3619-1443



YouTube 配信中 修理回数を減らす強い味方!  
コントラジェット

検索