

類別:機械器具 55 医療用洗浄器  
一般医療機器 一般的名称:口腔洗浄器 JMDNコード:12304019

## ポーター

### 【禁忌・禁止】

#### \*\* <使用方法>

1. 付属のエアースプレー「Fresh(医療機器製造販売届出番号13B2X00316310012)」は使いきって廃棄すること。廃棄するときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでスパウトを押し、ガスを抜くこと。[引火する恐れがあるため]
2. 付属品は本商品専用の別売品以外は使用しないこと。[故障や動作不良の原因になるため]
- \* 3. ご使用の際は、ペット容器的規定量(50cc)以上は入れないこと。[動作不良の原因になるため]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 外観



#### \*\* 2. 構成

- ①ステンレス製架台
- ②本体(PET容器:プラスチック/ホース:塩化ビニール/3wayシリンジ/キャップ)
- ③専用エアースプレー「Fresh」

#### 3. 寸法及び重量

- ①寸法      ステンレス製架台:W140mm×D90mm×H130mm  
                 本体:下部直径70mm×H360mm  
                 (ホース長さ約1,900mm)
- ②重量      総重量1.3kg(水は含まず)

#### 4. 動作原理

ペット容器内の水を空気圧で、水/空気/霧状のいずれかを噴射。訪問診療先等の歯科治療時に使用する簡易シリンジ。

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科治療における訪問診療等に用いる可動式簡易シリンジ。

### 【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照のこと。

#### \*\* 1. 使用準備

- ①ペット容器に規定量(50cc)の水を入れ、キャップをしめる。
- ②断続的に数回エアを注入する。このとき、エアが入らなくなるまで、注入する。
- ③3wayシリンジのリングを深く押し、ノズルを差し込む。

#### 2. 使用方法

- ①水用ボタンを押し、ノズルより水を出す。
- ②エア用ボタンを押し、ノズルよりエアを出す。
- ③水用・エア用の両ボタンを同時に押し、水とエアが混合されたスプレー(霧状)を出す。

#### 3. 使用后

- ①ペット容器内に残った水を捨てる。
- ②着脱可能なノズルをオートクレーブ滅菌する。

### 【使用上の注意】

#### \*\* 重要な基本的注意

- ①エアースプレーは専用のもの以外使用しないこと。
- ②熱湯は使用しないこと。
- ③ペット容器に水以外のものを入れられないこと。
- ④ペット容器内に水が入った状態で倒したりしないこと。
- \* ⑤専用エアースプレー「Fresh」は斜めにしたり、逆さでの使用はしないこと。「Fresh」の液体が水に混ざると水が過酸化し、使用出来なくなるため]

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- ①日光及び高温多湿は避けて保管すること。
- ②気圧、湿度、風通し、塩分、オゾン、硫黄分を含んだ空気等により悪影響の生じる可能性のある場所に保管しないこと。
- ③化学薬品の保管場所やガスの発生する場所では保管しないこと。
- ④本品は乾燥した状態で保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### \*\* 詳細は取扱説明書を参照のこと。

#### 使用者が日常的に行う手入れ方法

- ①PET容器は残った水を必ず捨て、乾燥させる。
- ②キャップの汚れや水分は乾いた布または固く絞った布等で拭く。
- ③PET容器、ステンレス製架台の汚れや水分は乾いた布、固く絞った布または、アルコール(弱いタイプ)で拭き取る。
- ④ノズル以外はオートクレーブ滅菌はしないこと。
- ⑤ホースはアルコール消毒しないこと。
- ⑥ベンジーやシンナーは使用しないこと。
- ⑦落下などで折れ曲がったノズルは使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名	ピヤス株式会社
住所	〒132-0035 東京都江戸川区平井6-73-9
電話番号	03-3619-1441
FAX	03-3619-1443
製造業者名	ピヤス株式会社
住所	〒132-0035 東京都江戸川区平井6-73-9
電話番号	03-3619-1441
FAX	03-3619-1443

取扱説明書を必ずご参照ください。